

SAFE-P Navy Standard Kit.

En förpackning innehåller; "Lår-Bälte", Textil-Ficka med lock, Fixerband 2 St, Urinpåse med tryckreduceringsventil med slang och urinuppsamlingslang. En konnektor till urinslangen samt 2 St Uridomer.

Beskrivning över rekommenderad tillämpning.

1. Tag lårbältet runt låret samt drag åt till önskat tryck, fixera sedan med bältets egna kardborrelås.
2. Öppna tygfickans lock och stoppa i urinuppsamlingspåsen i tygfickan och drag därefter igenom påsens urinslang och tryckreduceringslang genom lockets mittersta öppning, kontrollera att slangarna ej "knixar" sig.
3. Tag därefter fixerbanden 2 st och för igenom ett av banden genom lockets till vänster belägna hål och det andra genom lockets till höger belägna hål. Kontrollera därefter att banden ligger "slätt" och ej har vridit sig.
4. Stäng därefter igen locket mot påsens kardborrelås. Kontrollera att locket är dikt an i hela sin bredd mot påsen och att några veck ej förekommer. Låt de båda fixerbanden hänga fritt neråt.
5. Placera därefter tygfickans baksida mot lårbältets kardborre/mottagardel, samt tryck därefter fast tygfickan i lårbältet. Kontrollera att tygfickan sitter jäms med lårbältets övre kant i dess hela bredd. **OBS: För att undvika obehag/skavning etc. får tygfickan inte skjutas över lårbältet.**
6. Öppna härefter förpackningen till - eget val av - Uridome (medium eller large), placera vänster "handflata" (gäller högerhänta) tätt framför bukväggen och låt penis passera ut mellan långfinger och pekfinger. För handflatan tätt emot bukväggen, kontrollera noga att inget könshår sticker ut mellan fingrarna. Nyp därefter ihop fingrarna så att ordentlig stas erhålles på penis. Rulla på uridomen under pågående stas. Krama därefter runt uridomen med handen så att uridomens invändiga klister får ordentligt fäste. Släpp därefter stasen.
7. Tag urinslangen som sticker upp ur tygfickan och justera längden så att denna inte blir för lång = risk för knixning, eller för kort = kan ge obehag i form av dragkänsla i penis. Klipp slangens på önskad längd. **OBS: Klippet skall göras i slangens blanka segments överdel.**

Clean Analytical System AB

Adress:
Gårdfarivägen 3
532 38 Skara

Telefon:
0511-163 70

Fax:
0511-180 82

E-post:
info@casab.se

Hemsida:
www.casab.se

Beskrivning över rekommenderad tillämpning forts.

8. Tag härefter konnektorn och för ner dess nedre del = synliga delen, i slangen med en s.k. Skruv och tryck rörelse.
9. Avlägsna härefter skyddshuven på konnektorn och anslut konnektorn till uridomen. Kontrollera att konnektorn sitter ordentligt fast i uridomen.
10. Drag sedan upp tryckreduceringsslangen till ca. i nivå med naveln och fixera den mot bukväggen med plåster eller liknande. Tillse att slangen löper så lodrätt som möjligt.
11. Härefter dra upp byxan och låt de båda fixerbanden följa med. Innan byxans bälte drages åt, låt fixerbanden passera mellan byxa och bälte, fixerbanden går sedan tillbaks över bältets framsida och låses fast till önskat läge. Drag sedan åt byxans bälte till önskat läge. Korrekt applicerat fixerband medger nu språngmarscher utan nämnvärd lägespåverkan av produkten.

Avlägsnande av fylld påse:

1. Lossa konnektorn från uridomen.
2. Öppna locket på tygfickan.
3. Dra igenom slangen genom locket och lyft därefter ut påsen.
4. Sätt i ny påse och förfar enligt punkterna 2, 4, 7 --- 11 ovan.

Avlägsnande av förbrukad Uridome:

1. Rulla av uridomen från penis.
2. Kvarvarande eventuella klisterrester på penis-huden borttages enkelt med medicinsk bensin och eller med tvål och vatten.

Detta förslag till bruksanvisning är utarbetat av CAS AB och skall ses som en riktlinje på enkel applikation av produkten. Varje brukare av produkten, anpassar självfallet produkten enligt eget gottfinnande.